


PRODUCT CATALOG

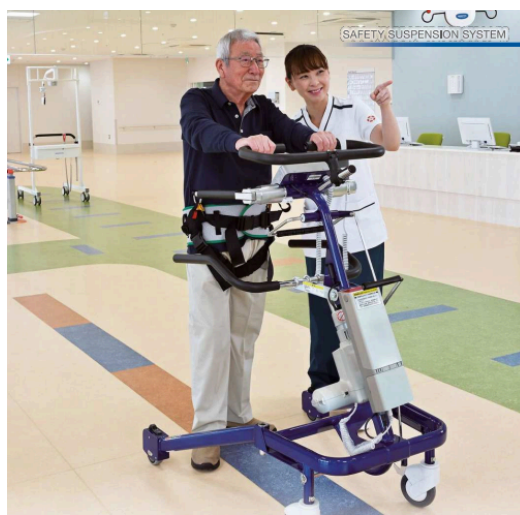

นำเข้าโดยและจัดจำหน่ายโดย: บริษัท ไทย โมริโตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


☎ 087-1121390, 082-5506058

✉ info@thaimoritoh.co.th 🌐 www.thaimoritoh.co.th

📘 Thai Moritoh-อุปกรณ์เพื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยกายภาพบำบัด

Sliding Sheet: IZAEMON

IZAEMON SHEEGLO

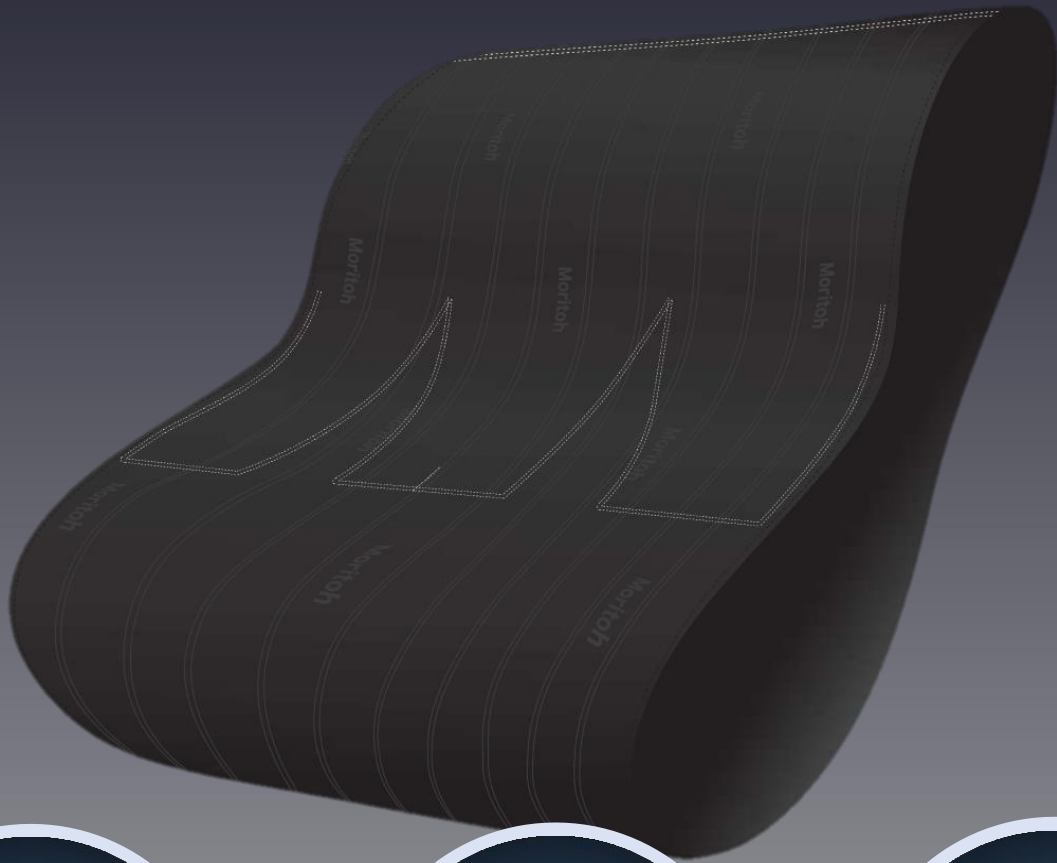

ป้องกันการ
เกิดแผลกดทับ

จัดท่านอน
บนเตียง

เคลื่อนย้าย
บนเตียง

ขพ. 115/2568

ใบรับจดแจ้งที่ 67-2-3-2-0010420


อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ผ้าช่วยเคลื่อนย้ายถูกออกแบบมาให้ผู้ดูแลสามารถจัดทำหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ ลดความเสี่ยงของผู้ดูแลในการยกหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วย


IZAEMON SHEEGLO

การเคลื่อนย้ายบนเตียง

แบ่งพับ 1 ใน 3 ส่วนของผ้า

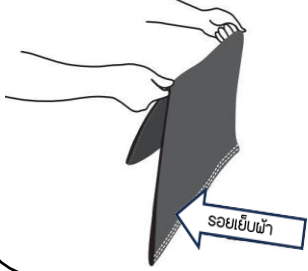


จับตรงรอยพับและสอดเข้าทางใต้หมอน

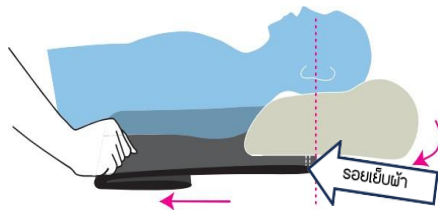

สอดผ้าผ่านตัวผู้ใช้งานจนกว่าขอบผ้าจะอยู่ตรงกับผู้ใช้ (ให้ปลายผ้าอยู่บริเวณหมอน)


ดึงผ้าด้านล่างให้ถึง
สะโพกผู้ใช้

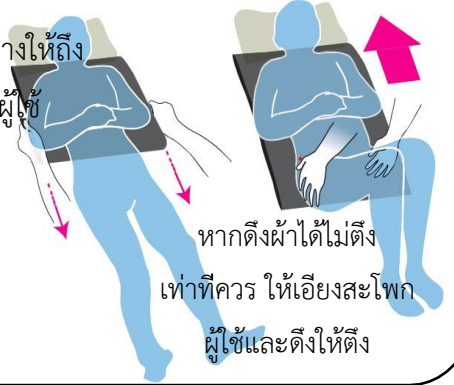

หากดึงผ้าได้ไม่ตรงเท่าที่ควร ให้เอียงสะโพกผู้ใช้และดึงให้ตรง


การเคลื่อนย้าย-ขวาบนเตียง

สอดมือเข้าช่องกลางแล้วดึงผ้าให้ตึง

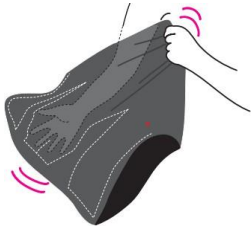


สอดผ้าเข้าไป

บริเวณไหล่หรือ
สะโพกที่รับน้ำหนัก

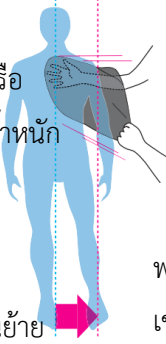


ขยับขาผู้ใช้งาน
ไปในทางที่จะเคลื่อนย้าย

พลิกตัวผู้ใช้งาน
เข้าหาตัวผู้ช่วยเหลือ

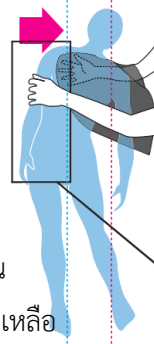


ในส่วนของสะโพก
ให้ทำแบบเดียวกัน

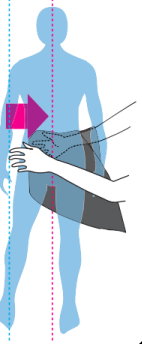

ในการเคลื่อนย้ายให้สอด
ผ้าในตำแหน่งที่จะเคลื่อน
ย้าย เพื่อความสะดวกสบาย

การลดแรงกดทับบนเตียง

สอดมือเข้าไปในช่องซ้ายหรือขวาแล้ว
ดึงด้านตรงข้ามให้ตึง

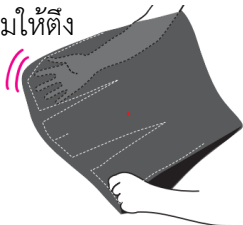

สอดผ้าเข้าใต้
ตัวผู้ใช้งาน และค่อยๆดึง
ไปทางปลายเท้า



ดึงผ้าด้านตรงข้าม
เพื่อให้ดึงผ้าได้
สะดวกมากขึ้น




สามารถช่วย
ลดแรงกดทับ
บนส่วนต่างๆ
ของร่างกาย



พลิกตัวบนเตียง

ให้ตะแคงผู้ใช้งานไปทางใด ทาง
หนึ่งของเตียง

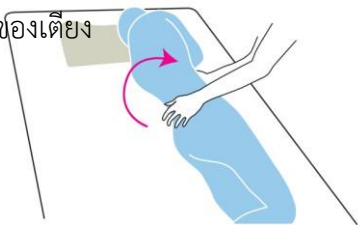


สอดผ้าไว้ใต้หลังของผู้ใช้งาน



พลิกตัวนอนหงาย
แล้วขยับแขนไป
ทางด้านที่จะพลิกตัว



ค่อยๆพลิก
ตัวผู้ใช้งาน

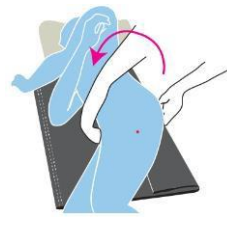

กรณีพลิกพร้อมขยับผู้ใช้งาน
ให้ทำการพลิกไปด้านที่
ต้องการและสอดผ้าบริเวณ
หลังของผู้ใช้งาน จากนั้นดัน
สะโพกไปยังฝั่งที่ต้องการ


สแกนเพื่อดูวิดีโอตัวอย่างการใช้งาน



IZAEMON SHEEGLO

(IZAEMON 210)

- ผลิตจากผ้าไนลอน
- ช่องสอดมือ 3 ช่อง
- ขนาด 75 x 70 ซม.

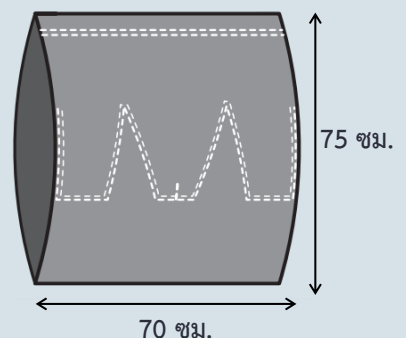

Sliding Sheet: IZAEMON

IZAEMON SHEET BLACK



ป้องกันการเกิด
แผลกดทับ

จัดท่านอน
บนเตียง

เคลื่อนย้าย
บนเตียง

ฉพ. 115/2568

ใบรับจดแจ้งที่ 67-2-3-2-0010420

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ผ้าช่วยเคลื่อนย้ายถูกออกแบบมาให้ผู้ดูแลสามารถจัดท่าหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ลดความเสี่ยงของผู้ดูแลในการยกหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วย




สแกนเพื่อดูวิดีโอ
ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

1. วิธีการสอดผ้าและดึงผ้าออก



จัดทำผู้ป่วยอยู่ในท่ากอดอก จากนั้นสอดผ้าจากใต้หมอน จนถึงบริเวณกลางหลัง

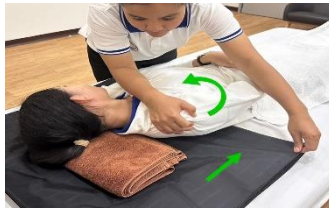

หากไม่สามารถสอดผ้าถึงกลางหลังได้ ให้ยกไหล่ผู้ป่วยขึ้นจากด้านหลังและดึงผ้าที่ละข้าง



กदन้าหนักลงบริเวณหมอน และดึงผ้าออกทางด้านข้าง

2. วิธีการเคลื่อนผู้ป่วยไปทางศีรษะ



จัดทำผู้ป่วยให้ยกต้นขาขึ้น จากนั้นประคองบริเวณไหล่และหัวเข่าแล้วให้ผู้ป่วยเหยียดขาเพื่อดันตัวขึ้น



หรือทำการประคองสะโพกและต้นผู้ใช้งาน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ใช้งานไปด้านศีรษะ




หรือใช้เข็มขัดคาดบริเวณใต้ต้นขาของผู้ป่วย แล้วออกแรงดึงเบาๆ เพื่อเคลื่อนตัวทางศีรษะ



สำหรับผู้ป่วยน้ำหนักมากหรือที่นอนนุ่ม ให้เพิ่มผ้าอีกผืนบริเวณใต้สะโพก

3. วิธีการเคลื่อนผู้ป่วยไปด้านข้าง

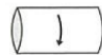

พลิกตัวผู้ป่วยให้หันไปอีกฝั่งของผู้ดูแล แล้วสอดผ้าใต้ลำตัวผู้ป่วย



พลิกตัวผู้ป่วยกลับมา จากนั้นทำการจับไหล่และสะโพกของผู้ป่วยแล้วดึงเข้าหาตัวผู้ดูแล




วางผ้าช่วยเคลื่อนย้ายไว้ใต้ผ้าห่มหรือผ้าอื่นๆ ที่รองใต้ตัวผู้ป่วย ดึงผ้าห่มช้าๆ เพื่อเคลื่อนผู้ป่วยในแนวด้านข้าง




ใช้ผ้าห่มเพื่อช่วยดึงร่างกายของผู้ป่วยขึ้นอย่างช้าๆ ในแนวทแยง จากนั้นสามารถเปลี่ยนท่าการนอนผู้ป่วยในตำแหน่งที่ต้องการ


IZAEMON SHEET BLACK

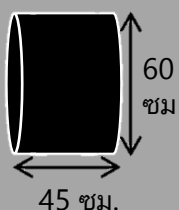

Size S
(IZAEMON 110)

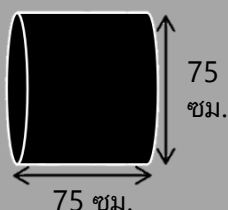

Size M
(IZAEMON 120)

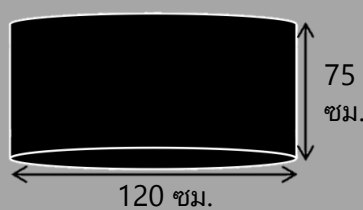

Size ML
(IZAEMON 130)



Size L
(IZAEMON 140)

เครื่องยกและเคลื่อนย้าย TSURUBE รุ่น Y6 Li-Pink

ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว ช่วยให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงไปยังรถเข็นหรือสถานที่อื่นๆ และสามารถใช้ในการฝึกเดินเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเดิน หรือผู้ที่อยู่ในช่วงพักฟื้นหลังการผ่าตัด


รับน้ำหนักได้สูงสุด
120 กิโลกรัม



TSURUBE Y6 Li-Pink เพื่อยกและเคลื่อนย้าย



TSURUBE Y6 Li-Pink เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย

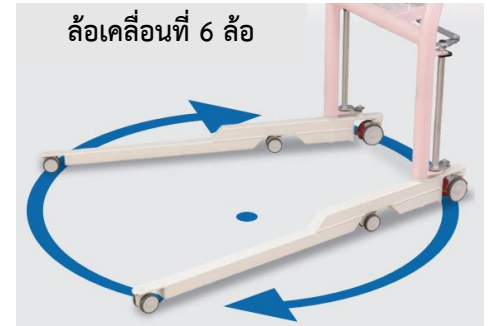

ล้อเคลื่อนที่ 6 ล้อ

ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักผู้ป่วย



ข้อมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์

ความเร็วในการยก	• ยกขึ้น 36.3 มม./วินาที • ยกลง 37.2 มม./วินาที
การชาร์จไฟ	AC 220V – 50 Hz
ความสูงในการยก	• สูงสุดจากพื้น 1,720 มม. • ยกต่ำสุดจากพื้น 360 มม.
ความสูงในการยก (กรณีติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนัก)	• สูงสุดจากพื้น 1,560 มม. • ต่ำสุดจากพื้น 200 มม.
ฟังก์ชันความปลอดภัย	• ปุ่มลกระดับฉุกเฉิน • สวิตช์ฉุกเฉิน(Emergency)
วัสดุของอุปกรณ์	เหล็ก

ขพ. 117/2568

ใบรับจดแจ้งที่ 67-2-3-2-0010230

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ผ้ายกผู้ป่วยรุ่น EVE/PAO



ผ้ายกผู้ป่วย รุ่น EVE

- ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายไปที่เตียง รถเข็น อ่างอาบน้ำ เป็นต้น
- สามารถใส่และถอดออกได้ขณะผู้ป่วยนั่งบนรถเข็น



ผ้ายกผู้ป่วย รุ่น PAO

- สามารถใส่และถอดออกได้ในขณะที่ผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียง
- ผ้ารบายอากาศได้

ผ้ายกผู้ป่วย รุ่น PAO Mesh Blue

- ผ้ามตาข่ายช่วยให้ในการระบายน้ำ
- สำหรับการเคลื่อนย้ายไปยังอ่างอาบน้ำ
- สายแขวนผู้ป่วยสามารถถอดออกจากผ้าได้ขณะผู้ป่วยนั่งหรือเอนตัว

ผ้ายกผู้ป่วย รุ่น PAO Mesh Gray

- ผ้ามมีลักษณะเป็นตาข่ายเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังอ่างอาบน้ำ
- รองรับน้ำหนักของผู้ป่วย และสามารถใช้งานกับผู้ป่วยที่เจาะคอ (tracheostomy) ได้



EVE Half

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีคอและลำตัวค่อนข้างแข็งแรง



EVE Full

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีคอและลำตัวค่อนข้างอ่อนแรง

EVE Half Small (EVE220)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูง 135-150 ซม.
EVE Half Medium (EVE210)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูง 150-190 ซม.
EVE Full Small (EVE250)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูง 135-150 ซม.
EVE Full Medium (EVE240)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูง 150-190 ซม.



PAO Half

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีคอและลำตัวค่อนข้างแข็งแรง



PAO Full

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีคอและลำตัวค่อนข้างอ่อนแรง

PAO Half (PAO100)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูงไม่เกิน 180 ซม.
PAO Full (PAO120)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูงไม่เกิน 175 ซม.
PAO Long (PAO130)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูงไม่เกิน 190 ซม.



PAO Mesh Blue Half



PAO Mesh Blue Full



PAO Mesh Gray

PAO Mesh Blue Half (PAO140)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูงไม่เกิน 180 ซม.
PAO Mesh Blue Full (PAO150)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูงไม่เกิน 175 ซม.
PAO Mesh Gray Small (PAO350)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูง 135-150 ซม.
PAO Mesh Gray Medium (PAO340)	ผู้ใช้งานที่มีส่วนสูง 159-190 ซม.



อุปกรณ์ช่วยพยุงและรองรับน้ำหนัก ช่วยให้ผู้ใช้งานฝึกการทรงตัวและการเคลื่อนไหว รวมถึงผู้ใช้งานที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดหรือบาดเจ็บ โดยช่วยฝึกการเคลื่อนไหว อุปกรณ์นี้สามารถช่วยพยุงน้ำหนักผู้ใช้งานได้ 0-40 กิโลกรัม ทำให้ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บบริเวณขา และข้อเข่าในการรับน้ำหนักร่างกาย



อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

POPO series

Non-weight bearing type lift: popo



สายรัด (Harness) ที่ใช้งานร่วมกับเครื่องช่วยพยุงเดิน POPO

Harness Hybrid



Size SS (HV-100)	ความยาวรอบเอว 55-65 ซม.
Size S (HV-110)	ความยาวรอบเอว 65-75 ซม.
Size M (HV-120)	ความยาวรอบเอว 75-90 ซม.
Size L (HV-130)	ความยาวรอบเอว 90-100 ซม.
Size LL (HV-140)	ความยาวรอบเอว 100-110 ซม.

Harness Light



Size S (L-110)	ความยาวรอบเอว 72-86 ซม.
Size M (L-120)	ความยาวรอบเอว 86-100 ซม.
Size L (L-130)	ความยาวรอบเอว 100-114 ซม.

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ของ POPO

น้ำหนักที่อุปกรณ์รองรับ	100 กิโลกรัม
ระยะของการยก	590-1,360 มิลลิเมตร
การชาร์จไฟ	AC 220 Volt -50Hz
ระบบความปลอดภัย	- ปุ่มลดระดับฉุกเฉิน - สวิตช์ฉุกเฉิน (EMERGENCY)
วัสดุของเครื่อง	เหล็ก
น้ำหนักของตัวเครื่อง	35 กิโลกรัม
แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)	แบตเตอรี่ชนิด Small sealed storage ES2.9-12.12V.2.9Ah, 2 ก้อน



ขพ. 239/2568

ใบรับจดแจ้งที่ 68-2-3-2-0001162

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Suspension Rehabilitation Lift

เครื่องพยุงผู้ป่วยแบบรองรับน้ำหนักร่างกายทั้งหมด



รับน้ำหนักได้สูงสุด 100 กิโลกรัม

- ที่แขวนแบบสปริงที่ปรับตัวตามแรงและการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย
- ล้อเคลื่อนที่ขนาด 125 มม. เพื่อให้เคลื่อนไหวย่างราบรื่น
- ปรับทิศทางเคลื่อนที่ของล้อทั้ง 4 ได้ในทางทิศทางตรง หมุนอิสระ และหยุดทั้ง 4 ล้อ
- ราวจับปรับความสูงได้ตามความเหมาะสมของผู้ป่วย
- ปรับระดับแรงพยุงร่างกายด้วยสวิตช์ควบคุม
- ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนัก เพื่อใช้วัดปริมาณน้ำหนักผู้ป่วยที่ถูกพยุง

Suspension Rehabilitation Lift: TG-800 : ฐานเครื่องกว้าง 800 มม.
(TG-800)

Suspension Rehabilitation Lift: TG-1000 : ฐานเครื่องกว้าง 1,000 มม.
(TG-1000)

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

ระยะการยก (ต่ำสุด-สูงสุด)	1,370-2,260 มิลลิเมตร
การชาร์จไฟ	AC 220 Volt -50Hz
ระบบความปลอดภัย	- ปุ่มลดระดับฉุกเฉิน - สวิตช์ฉุกเฉิน (EMERGENCY)
วัสดุของเครื่อง	เหล็ก

สายรัด รุ่น Harness Hybrid



- สายรัดชนิดคลุมต้นขา เหมาะสำหรับผู้ป่วยต้องการการพยุงมาก
- สายรัดรองรับกระดูกเชิงกรานเพื่อช่วยพยุงการแกว่งของขา
- สวมใส่ขณะผู้ป่วยอยู่ในท่านอน หรือทำยืนได้

Size SS (HV-100)	ความยาวรอบเอว 55-65 ซม.
Size S (HV-110)	ความยาวรอบเอว 65-75 ซม.
Size M (HV-120)	ความยาวรอบเอว 75-90 ซม.
Size L (HV-130)	ความยาวรอบเอว 90-100 ซม.
Size LL (HV-140)	ความยาวรอบเอว 100-110 ซม.

สายรัด รุ่น Harness Light



- สายรัดร้อยผ่านบริเวณขาหนีบทำให้ใส่และถอดได้ง่าย
- สวมใส่ขณะผู้ป่วยนั่งบนรถเข็นได้
- สายรัดบริเวณขาหนีบมีฟองน้ำด้านใน

Size S (L-110)	ความยาวรอบเอว 72-86 ซม.
Size M (L-120)	ความยาวรอบเอว 86-100 ซม.
Size L (L-130)	ความยาวรอบเอว 100-114 ซม.