

Sliding Sheet: IZAEMON

IZAEMON SHEET BLACK



ป้องกันการเกิด
แผลกดทับ

จัดท่านอน
บนเตียง

เคลื่อนย้าย
บนเตียง

ขพ. 115/2568

ใบรับจดแจ้งที่ 67-2-3-2-0010420

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ผ้าช่วยเคลื่อนย้ายถูกออกแบบมาให้ผู้ดูแลสามารถจัดทำหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ลดความเสี่ยงของผู้ดูแลในการยกหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วย



สแกนเพื่อดูวิดีโอ
ตัวอย่างการใช้งาน

ติดต่อเรา



นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ไทย โมริโตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 147/130 หมู่ 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร : 087-1121390 หรือ 082-5506058 E-mail : Info@thaimoritoh.co.th

ตัวอย่างการใช้งาน

1. วิธีการสอดผ้าและดึงผ้าออก



จัดทำผู้ป่วยอยู่ในท่ากอดอก จากนั้นสอดผ้าจากใต้หมอน จนถึงบริเวณกลางหลัง



หากไม่สามารถสอดผ้าถึงกลางหลังได้ ให้ยกไหล่ผู้ป่วยขึ้นจากด้านหลังและดึงผ้าที่ละข้าง



กदन้าหนักลงบริเวณหมอน และดึงผ้าออกทางด้านข้าง


2. วิธีการเคลื่อนผู้ป่วยไปทางศีรษะ



จัดทำผู้ป่วยให้ยกต้นขาขึ้น จากนั้นประคองบริเวณไหล่และหัวเข่าแล้วให้ผู้ป่วยเหยียดขาเพื่อดันตัวขึ้น



หรือทำการประคองสะโพกและต้นผู้ใช้งาน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ใช้งานไปด้านศีรษะ

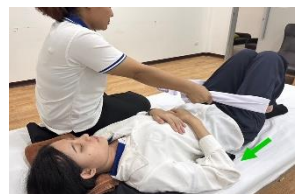


หรือใช้เข็มขัดคาดบริเวณใต้ต้นขาของผู้ป่วย แล้วออกแรงดึงเบาๆ เพื่อเคลื่อนตัวทางศีรษะ



สำหรับผู้ป่วยน้ำหนักมากหรือที่นอนนุ่ม ให้เพิ่มผ้าอีกผืนบริเวณใต้สะโพก

3. วิธีการเคลื่อนผู้ป่วยไปด้านข้าง

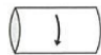

พลิกตัวผู้ป่วยให้หันไปอีกฝั่งของผู้ดูแล แล้วสอดผ้าใต้ลำตัวผู้ป่วย



พลิกตัวผู้ป่วยกลับมา จากนั้นทำการจับไหล่และสะโพกของผู้ป่วยแล้วดึงเข้าหาตัวผู้ดูแล




วางผ้าช่วยเคลื่อนย้ายไว้ใต้ผ้าห่มหรือผ้าอื่นๆ ที่รองใต้ตัวผู้ป่วย ดึงผ้าห่มช้าๆ เพื่อเคลื่อนผู้ป่วยในแนวด้านข้าง




ใช้ผ้าห่มเพื่อช่วยดึงร่างกายของผู้ป่วยขึ้นอย่างช้าๆ ในแนวทแยง จากนั้นสามารถเปลี่ยนท่าการนอนผู้ป่วยในตำแหน่งที่ต้องการ


IZAEMON SHEET BLACK

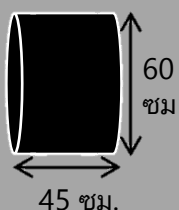

Size S
(IZAEMON 110)

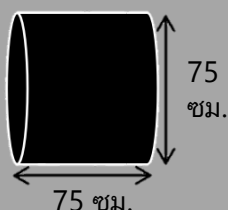

Size M
(IZAEMON 120)

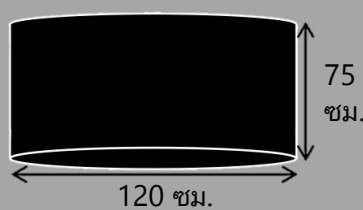

Size ML
(IZAEMON 130)



Size L
(IZAEMON 140)