


Sliding Sheet: IZAEMON

IZAEMON SHEEGLO

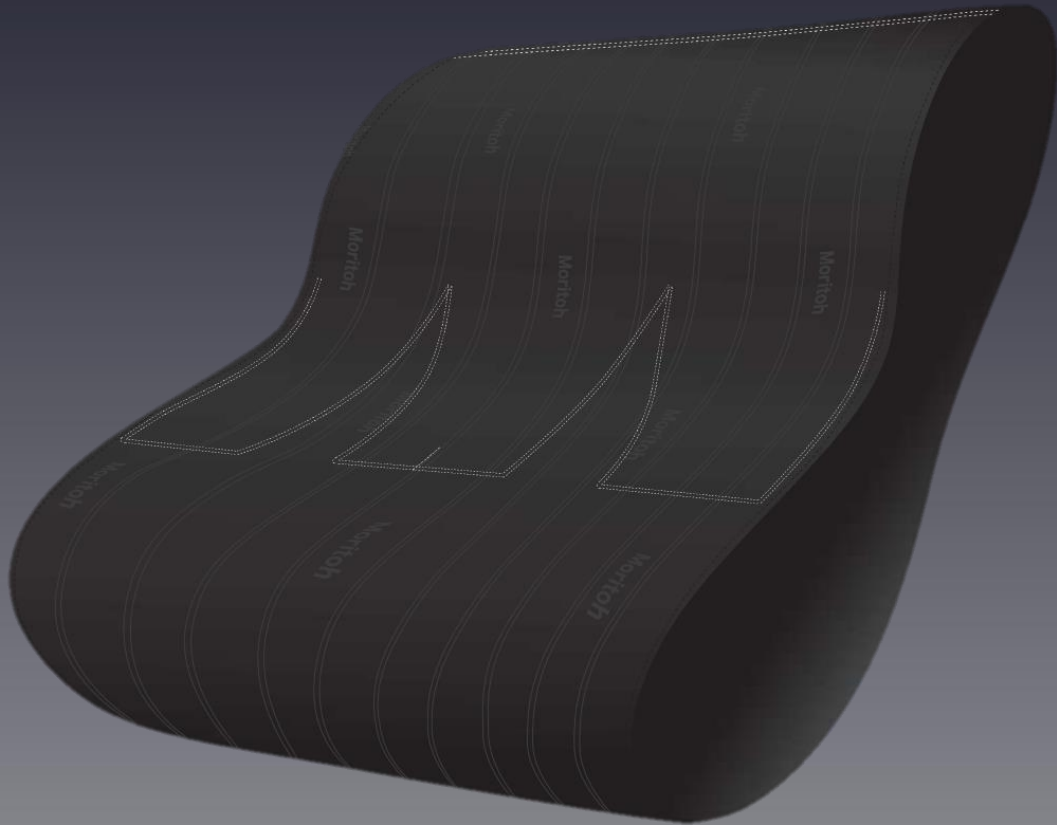

ป้องกันการ
เกิดแผลกดทับ

จัดท่านอน
บนเตียง

เคลื่อนย้าย
บนเตียง

ขพ. 115/2568

ใบรับจดแจ้งที่ 67-2-3-2-0010420

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ผ้าช่วยเคลื่อนย้ายถูกออกแบบมาให้ผู้ดูแลสามารถจัดทำหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ ลดความเสี่ยงของผู้ดูแลในการยกหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วย



สแกนเพื่อดูวิดีโอ
ตัวอย่างการใช้งาน


ติดต่อเรา




IZAEMON SHEEGLO

การเคลื่อนย้ายบนเตียง

แบ่งพับ 1 ใน 3 ส่วนของผ้า

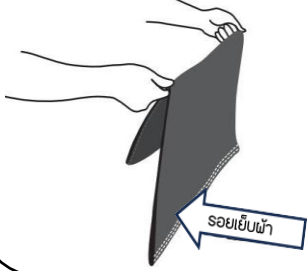

จับตรงรอยพับและสอดเข้าทางใต้หมอน

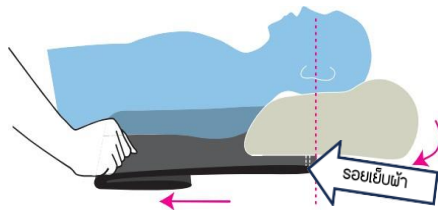

สอดผ้าผ่านตัวผู้ใช้งานจนกว่าขอบผ้าจะอยู่ตรงกับผู้ใช้ (ให้ปลายผ้าอยู่บริเวณหมอน)


ดึงผ้าด้านล่างให้ถึง
สะโพกผู้ใช้



หากดึงผ้าได้ไม่ตรงเท่าที่ควร ให้เอียงสะโพกผู้ใช้และดึงให้ตรง

การเคลื่อนย้าย-ขวบนเตียง


สอดมือเข้าช่องกลางแล้วดึงผ้าให้ตึง

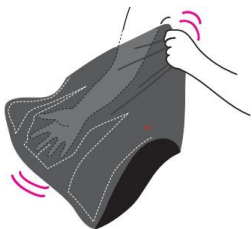


สอดผ้าเข้าไป

บริเวณไหล่หรือ
สะโพกที่รับน้ำหนัก

ขยับขาผู้ใช้งาน
ไปในทางที่จะเคลื่อนย้าย

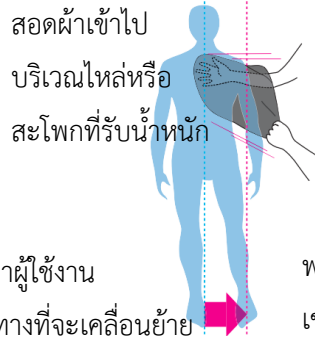


พลิกตัวผู้ใช้งาน
เข้าหาตัวผู้ช่วยเหลือ

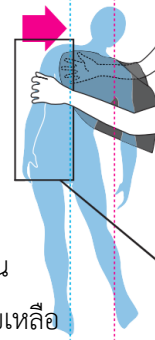


ในส่วนของสะโพก
ให้ทำแบบเดียวกัน

ในการเคลื่อนย้ายให้สอด
ผ้าในตำแหน่งที่จะเคลื่อน
ย้าย เพื่อความสะดวกสบาย

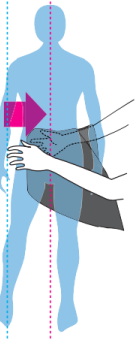

การลดแรงกดทับบนเตียง

สอดมือเข้าไปในช่องซ้ายหรือขวาแล้ว
ดึงด้านตรงข้ามให้ตึง

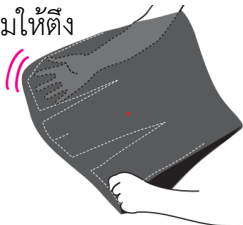


สอดผ้าเข้าใต้
ตัวผู้ใช้งาน และค่อยๆดึง
ไปทางปลายเท้า



ดึงผ้าด้านตรงข้าม
เพื่อให้ดึงผ้าได้
สะดวกมากขึ้น




สามารถช่วย
ลดแรงกดทับ
บนส่วนต่างๆ
ของร่างกาย

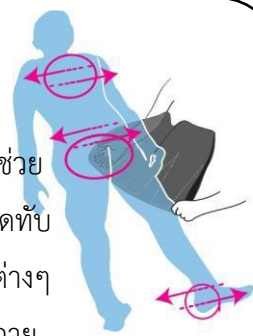

พลิกตัวบนเตียง

ให้ตะแคงผู้ใช้งานไปทางใด ทาง
หนึ่งของเตียง

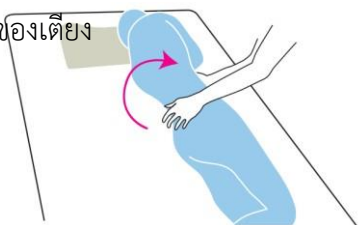

สอดผ้าไว้ใต้หลังของผู้ใช้งาน



พลิกตัวนอนหงาย
แล้วขยับแขนไป
ทางด้านที่จะพลิกตัว



ค่อยๆพลิก
ตัวผู้ใช้งาน



กรณีพลิกพร้อมขยับผู้ใช้งาน
ให้ทำการพลิกไปด้านที่
ต้องการและสอดผ้าบริเวณ
หลังของผู้ใช้งาน จากนั้นดัน
สะโพกไปยังฝั่งที่ต้องการ

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท ไทย โมริโตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 147/130 หมู่ 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทร : 087-1121390 หรือ 082-5506058

E-mail : Info@thaimoritoh.co.th

IZAEMON SHEEGLO

(IZAEMON 210)

- ผลิตจากผ้าไนลอน
- ช่องสอดมือ 3 ช่อง
- ขนาด 75 x 70 ซม.

